

Gebrauchsanweisung

Cavex Bite&White StainLess

Produktbeschreibung

Vor Beginn einer Zahnaufhellungsbehandlung ist eine gründliche Reinigung der Zähne sehr wichtig, um ein optimales Aufhellungsergebnis zu gewährleisten.

Cavex Bite&White StainLess ist ein Zahnaufhellungsaktivator und eine Fleckenentfernungspaste. Es entfernt oberflächliche Flecken und Plaque von den Zähnen. Außerdem verbessert es Aufhellungsbehandlungen, indem es den pH-Wert im Mund optimiert.

- Leicht abrasiv für Zahnschmelz/Dentin
- Hohe Reinigungs- und Polierwerte.
- Erhöht den pH-Wert des Mundes als Vorbehandlung zur Zahnaufhellung.
- Nicht für den regelmäßigen Gebrauch bestimmt.

Zusammensetzung

Aqua, Sorbitol, Hydrated silica, Glycerin, Erythritol, Lithium magnesium sodium silicate, Poloxamer, Natrium hexametaphosphat, Cellulose gum, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Natrium saccharin, Mint aroma, Limonene, CI 42090

Anwendungsgebiet

Die Paste wird als Vorbehandlungsaktivator für die Zahnaufhellung in der Praxis und/oder zu Hause verwendet.

Kontraindikationen und Warnungen

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei Allergien gegen das Minzaroma oder einen der Inhaltsstoffe.

Mögliche Nebenwirkungen

Überempfindlichkeiten gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden.

Lagerbedingungen

Das Material nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht bei Temperaturen über 25 °C (77 °F) lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Kühl und trocken (frostfrei) lagern. Tube nach Gebrauch immer fest verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Warnhinweise

Bei Augenkontakt gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Material nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.


Gebrauchsanweisung

Handhabung


1. Cavex Bite&White StainLess auf die Zahnbürste auftragen

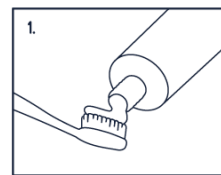

2. Zähne gründlich putzen

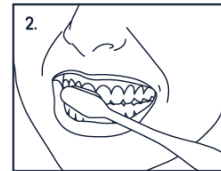


3. Zähne mindestens 2-3 Minuten putzen

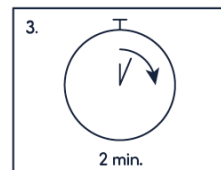

4. Spucken Sie überschüssiges Material aus



5. Nicht mit Wasser abspülen

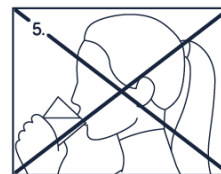

Beschriftung

Diese Informationen entsprechen der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel und der europäischen Gesetzgebung.

Beabsichtigte(r) Patient(en)

Cavex Bite&White StainLess kann von allen Personen über 18 Jahren als Vorbehandlung für das Aufhellungsgel verwendet werden.

Bei schwangeren und stillenden Frauen müssen die Risiken der Behandlung unter Berücksichtigung des ungeborenen Kindes bzw. Säuglings sorgfältig gegen den Nutzen abgewogen werden.

Vorgesehene(r) Benutzer

Cavex Bite&White StainLess wird hauptsächlich von Zahnärzten verwendet. Nach Rücksprache mit dem Zahnarzt kann das Produkt auch vom Patienten zu Hause verwendet werden.

Klinische Vorteile

Die folgenden klinischen Vorteile von Cavex Bite&White StainLess sind zu erwarten:

StainLess-Paste reinigt die Zähne gründlich und ermöglicht dem Bleichgel den direkten Kontakt mit dem Zahnschmelz. Sie entfernt oberflächliche Verfärbungen von den Zähnen und erhöht vorübergehend den pH-Wert im Mund. Auf diese Weise optimiert die StainLess Extreme-Reinigungspaste die Leistung von Wasserstoffperoxid.

Gebrauchsanweisung

Produktmerkmale

- Gründliche Reinigung und Entfernung von Plaque
- Erhöht den pH-Wert im Mund und optimiert die Aufhellung
- Frischer und angenehmer Geschmack

Produktmerkmale und Spezifikationen

Jede Charge Cavex Bite&White StainLess entspricht unseren internen Tests:

| Test | Test method | Cavex Stainless Release Specification | |
|------------|-------------|---------------------------------------|------|
| Appearance | B10 | Blue paste | |
| Flavour | B11 | Lime / mint flavor | |
| pH | B12 | 6.8 – 8.2 | |
| Viscosity | B13 | 10 – 10000 | Pa.s |

Kombinationsprodukte:

Zubehör:

Cavex Bite&White StainLess erfordert keine speziellen Kombinationen mit Zubehör.

Kombinationsprodukte:

Cavex Bite&White StainLess kann in Kombination mit einer Aufhellungsbehandlung verwendet werden.

Lagerungshinweise

Das Material nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht bei Temperaturen über 25 °C (77 °F) lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Kühl und trocken (frostfrei) lagern. Tube nach Gebrauch immer gut verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Werfen Sie den Inhalt bzw. die teilentleerte Verpackung nicht in den Hausmüll und lassen Sie sie nicht in die Kanalisation gelangen.

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 23 5307700
dental@cavex.nl

Made in The Netherlands

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung für Schäden bestehen, ist diese auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Version: ZB713.00

Date: 12-9-2023

TS2023-09 DE
Document: Instructions for Use

Seite 3 of 3
Revision: 0