


## Der Mischbecher

1. Bringen Sie den Deckel auf dem Mischbecher an und drehen Sie ihn zum Verriegeln nach rechts.
2. Achten Sie darauf, dass die Öffnung im Deckel nicht blockiert ist.
3. Achten Sie darauf, dass die Außenseite des Mischbechers sauber und trocken ist.

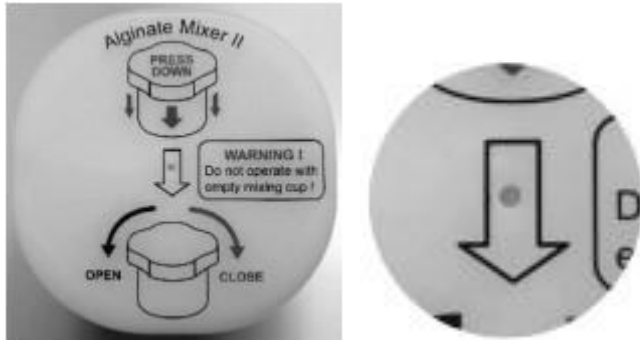

## Das Reinigen

Wischen Sie den Becher nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch aus. Die Ecken und Vertiefungen reinigen Sie am Besten mit einer Zahnbürste / Prothesenbürste.

Legen Sie Ihre Mischbecher und das Dosierbesteck regelmäßig am Abend in ein Gips- & Alginatlöserbad (Cavex CreenClean). So stellen Sie sicher das Ihre Becher lange halten.

## Das Mischen

1. Achten Sie darauf, dass der Mischbecher sorgfältig verschlossen wurde.
2. Stellen Sie den vorbereiteten Mischbecher fest in die Mischmulde.
3. Schließen Sie den Deckel des Geräts und überprüfen Sie, ob die richtige Mischzeit eingestellt wurde.
4. Drücken Sie auf die Start/Stopp-Taste, um den Mischzyklus zu starten.
5. Warten Sie auf den Piepton, bevor Sie den Deckel öffnen. Entfernen Sie die Alginat-Mischung mit einem Spatel aus dem Mischbecher.

### Hinweis:

*Der Mischbecher, Spatel und Rührstab müssen nach jedem Gebrauch mit Wasser abgewaschen und vollständig getrocknet werden.*