

# Cavex Wasserdosierflasche

Verschiedene externe Faktoren können die Qualität des Alginatabdrucks beeinflussen. Daher ist es wichtig, so viele dieser Faktoren wie möglich zu standardisieren. Die Cavex Wasserdosierflasche ist ein Zubehör, das Teil der Lösung zur Standardisierung externer Faktoren ist.

## Anwendung

Drücken Sie die Flasche, bis die richtige Wassermenge erreicht ist. Zuviel Wasser wird zurückgesaugt



### Dosieren mit dem Messlöffeln

Um die richtige Wassermenge pro Messlöffel Alginat zu ermitteln, können Sie die Linien auf der Kappe verwenden. Drücken Sie beispielsweise bei zwei Messlöffeln Alginat die Flasche bis zur zweiten Linie zusammen.



### Verstellbarer Strohhalm

Der Strohhalm in der Flasche lässt sich auf die gewünschte Größe einstellen. So haben Sie immer die gleiche Wassermenge.



### Aufbereitetes Wasser

Mit der Wasserflasche haben Sie eine konstante Wassertemperatur (Zimmertemperatur). Eine konstante Wassertemperatur = konstante Misch- und Abbindezeit = konstante und vorhersehbare Qualität.

**CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN**



**Cavex Holland BV,**

Fustweg 5

2031 CJ Haarlem

The Netherlands

Tel +31 23 530 77 00

dental@cavex.nl

www.cavex.nl

**CAVEX**

www.cavex.nl

ATI021.00DE