


DAS PERFEKTE ALGINAT FÜR JEDE SITUATION

Cavex CA37 Der Goldstandard

Cavex CA37 ist ein universelles Abformmaterial, das täglich in Zehntausenden von zahnärztlichen Praxen weltweit eingesetzt wird. Es war das erste Alginat-Abformmaterial, das weltweit als Maßstab galt. Dank seiner kurzen Abbindezeit und des frischen Pfefferminzgeruchs erleben Patienten eine angenehme Behandlung. Darüber hinaus eignet sich Cavex CA37 ideal für prothetische Eingriffe. Erhältlich in den Ausführungen Fast Set und Normal Set.

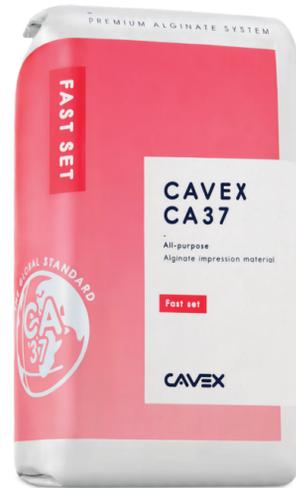

Cavex ColorChange 9 Tage dimensionsstabil

Cavex ColorChange ist ein anwenderfreundliches Abformmaterial mit fortschrittlicher visueller Farbveränderung und gehört zur neuesten Generation der Cavex-Alginate. Die Farbveränderungen zeigen genau an, in welchem Stadium des Abformprozesses Sie sich befinden. Dank des einzigartigen Reaktionsgleichgewichts bleibt der Abdruck bis zu 9 Tage lang dimensionsstabil.



Cavex Impressional Hoch elastisch

Cavex Impressional vereint höchste Elastizität, Reißfestigkeit und Detailwiedergabe bis zu 25 µm. Dadurch eignet sich das Alginat hervorragend für Modellgußprothesen und tiefe Unterschnitte. Erhältlich in den Ausführungen Fast Set und Normal Set.



Cavex Orthotrace Speziell für die Bedürfnisse von Kieferorthopäden entwickelt

Cavex Orthotrace ist ein kieferorthopädisches Alginat-Abformmaterial mit extra schneller Abbindung und erfrischendem Duft nach roten Früchten. Die kürzere Abbindezeit verhindert, dass sich das Alginat im hinteren Mundbereich absetzt, wodurch das Würgerrisiko deutlich reduziert wird. Darüber hinaus erleichtern der angenehme Duft und die Farbe die Abformung für den Patienten.



CAVEX ALGINATE

DIE WELTWEIT BESTEN ALGINATE

- Durch Fakten belegt, von Zahnärzten bestätigt



HO090VIZ

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY


DAS CAVEX ALGINAT-SYSTEM

Cavex bietet ein Komplettsystem für die Erstellung perfekter Abformungen. Dieses umfassende System vereinfacht nicht nur den Abformprozess, sondern garantiert auch unübertroffene Abformqualität und Sicherheit.

Mehr als sechzig Jahre Forschung und Erfahrung haben zu hochwertigen Alginat-Abformmaterialien geführt, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießen. Zehntausende Zahnärzte und Zahntechniker profitieren täglich von der außergewöhnlichen Qualität und den Vorteilen des Cavex Alginat-Systems.


Ihre Abformung ist unsere Spezialität. Eine perfekte Abformung ist kein Zufall. Das Endergebnis wird maßgeblich von der Qualität des Alginats und den Bedingungen des gesamten Prozesses bestimmt.

Überragende Reißfestigkeit

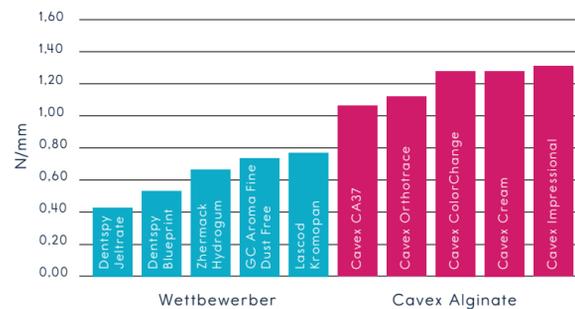

Reißfest und stark

- Reißfestigkeit: mindestens 2,5-mal höher des ISO/ADA-Kriteriums
- Kann mindestens zweimal ausgegossen werden
- Keine Nacharbeit

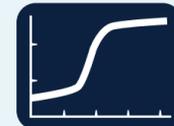

Snap-set

- Planbare Verarbeitungszeit
- Vollständige Abbindung in kurzer Zeit
- Minimale Patientenbelastung



5 Jahre Lagerfähig

- Zur Perfektion entwickelt
- Rohstoffe höchster Qualität
- Ausgezeichnete Stabilität
- Perfekte Abformungen auch nach 5 Jahren



SEIT ÜBER 10 JAHREN GETESTET ALS DAS BESTE ALGINAT



Cavex-Alginat übertreffen die Standards von Organisationen wie ISO und ADA schon lange. Wir halten jedoch unseren eigenen, noch höheren Standard ein – ein Unterschied, der deutlich wird, wenn Sie unsere Produkte mit denen der Mitbewerber vergleichen.

Cavex Cream Alginat Außergewöhnlich detailliert

Dieses moderne Alginat lässt sich ganz einfach zu einer schönen, glatten und cremigen Masse anrühren. Dank der außergewöhnlichen Detailwiedergabe von bis zu 5 µm in Kombination mit den „Standard“-Eigenschaften von Cavex-Alginat – wie hoher Reißfestigkeit, Snap-Set und einer Lagerfähigkeit von 5 Jahren – erreicht Cavex Cream Alginat Ergebnisse in Silikonqualität. Selbstverständlich ist dieses moderne Alginat auch scanbar.



Leistung und Spezifikationen von Cavex-Alginaten

	Cavex CA37		Cavex Impressional		Cavex ColorChange	Cavex OrthoTrace	Cavex Cream	
Inhalt	500 g.		500 g.		500 g.	500 g.	500 g.	
Anzahl Abformungen	ca. 35		ca. 38		ca. 38	ca. 35	ca. 35	
Konsistenz	fest		sehr elastisch		elastisch	fest	elastisch	
Dimensionsstabilität	2 Tage		2 Tage		9 Tage	2 Tage	2 Tage	
Detailwiedergabe	50 µm		25 µm		25 µm	50 µm	5 µm	
Farbe	pink		blau		helles pink	rosa	lila	
Farbumschlag	nein		nein		ja	nein	nein	
Duftstoff	Pfefferminze		grüne Minze		Pfefferminze	rote Früchte	Kaugummi	
Abbindezeit	NS & FS		NS & FS		FS	Extra FS	NS & FS	
Lagerfähigkeit	5 Jahre		5 Jahre		5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
	NS FS		NS FS				NS FS	
Mischzeit in Sekunden	30	30	30	30	30	30	30	20
Aushärtezeit im Mund in Sekunden	90	60	90	60	60	60	90	60
Gesamtaushärtezeit in Sekunden	210	150	210	150	150	130	210	140



ZUBEHÖR

Cavex ImpreSafe

Ein schnelles, sicheres und wirksames Desinfektionsmittel für alle Abformungen, das 99,99 % aller Bakterien, Pilze und Viren innerhalb von drei Minuten inaktiviert.

Cavex GreenClean

Cavex GreenClean entfernt schnell und einfach Alginat- und Gipsreste und ist sicher für Abformlöffel. Das Produkt ist pH-neutral, vollständig biologisch abbaubar und hat einen frischen Duft.

Cavex Alginat Adhäsiv

Verhindert, dass sich die Alginatabformung vom Abformlöffel löst, wenn dieser aus dem Mund des Patienten entnommen wird.

Cavex Alginate Container

Ermöglicht eine luftdichte Aufbewahrung, um das Alginat-Pulver vor Feuchtigkeit zu schützen. Erhältlich in zwei Farben zur einfachen Unterscheidung zwischen verschiedenen Alginaten.

Cavex Wasserdosierflasche

Sorgt stets für eine konstante Wassertemperatur und ermöglicht die einfache Dosierung der exakten Wassermenge. Dies garantiert eine gleichbleibende Qualität der endgültigen Abformung.

Cavex Anmischbecher mit Spatel

Dank des flexiblen Anmischbechers und des speziell entwickelten Spatels wird das manuelle Mischen einfacher und es entstehen weniger Klumpen und Luftblasen – was zu einer besseren Abformung führt.



Weitere Informationen unter www.cavex-deutschland.de oder telefonisch unter 04931 9809682